

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BABY SCALE
PRODI ILMU GIZI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



Kode Dokumen :
Revisi :
Tanggal Berlaku :

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disiapkan oleh:
<u>Pramudya Kurnia, M.Agr</u> Kaprodi Ilmu Gizi	<u>Aan Sofyan, M.Sc</u> Unit Jaminan Mutu	<u>Dina Permatasari, S.Gz</u> Laboran

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Standar Operasional Prosedur Baby Scale Laboratorium Prodi Ilmu Gizi	Kode Dokumen : Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku :
---	---	---	---

1. TUJUAN

Pemakaian Baby Scale secara benar

2. RUANG LINGKUP

SOP ini digunakan untuk membantu penggunaan Baby Scale dalam kegiatan praktikum Penilaian Status Gizi di lingkungan Laboratorium Diagnosis dan Konsultasi Gizi Program Studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta

3. DEFINISI

Standart Operasional Prosedur Baby Scale ini adalah langkah-langkah penggunaan Baby Scale dan pemeliharaannya.

4. REFERENSI

- 4.1 Prosedur Mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 Kode Dokumen PM-UMS-01 Tentang Sistem Pengendalian Dokumen dan Data.
- 4.2 Prosedur Mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 Kode Dokumen PM-UMS-09 Tentang Proses Pembelajaran

5. DISTRIBUSI

- 5.1 Kepala Laboratorium Dasar Prodi Ilmu Gizi UMS
- 5.2 Unit Jaminan Mutu Prodi Ilmu Gizi UMS
- 5.3 Laboran Prodi Ilmu Gizi
- 5.4 Dosen Pengampu Mata Praktik Prodi Ilmu Gizi UMS
- 5.5 Mahasiswa Prodi Prodi Ilmu Gizi UMS

6. SPESIFIKASI ALAT

Timbangan ONEMED

- | | |
|--------------------|--|
| Tingkat Ketelitian | : 0,05 kg untuk 10 kg dan 0,1 kg pada 10-20 kg |
| Kapasitas Maksimal | : 20 kg |
| Ukuran Nampan PxL | : 54,5 cm x 27 cm. |

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Standar Operasional Prosedur Baby Scale Laboratorium Prodi Ilmu Gizi	Kode Dokumen : Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku :
---	---	---	---

7. FUNGSI

Untuk menimbang bayi dari sejak lahir sampai berat badannya mencapai 20 Kg

8. PROSEDUR

8.1 Cara Penggunaan

- 1) Mengkalibrasi dengan cara mengenolkan pada tanda garis merah.
- 2) Melepaskan sandal, sepatu dan topi serta pampres yang menempel pada bayi.
- 3) Memposisikan bayi yang diukur dalam kondisi terlentang, dan seluruh anggota tubuh berada diatas timbangan.

8.2 Perawatan

- 1) Jangan memutar knob melebihi batas maksimal dan minimal.
- 2) Jangan ada kotoran atau noda pada kaca skala, bersihkan dengan menggunakan kain lembut dan jangan menggunakan air panas serta cairan organik.
- 3) Jangan diletakkan dekat api/panas, hindarkan dari sinar matahari langsung.
- 4) Bersihkan baby scale dari debu dengan menggunakan lap kering.

9. ARSIP

9.1 Standar Operasional Prosedur Laboratorium Prodi Ilmu Gizi

10. LAMPIRAN



Gambar Alat